


Aesculap Neurosurgery

GAV®



Unverbindliche Druckstufenempfehlung

GAV® - GRAVITY ASSISTED VALVE



Alter	Aktivitätsgrad	Größe	Statur	empfohlene Druckstufe in cmH ₂ O	
älter als 60 Jahre	mobil	kleiner als 1,60 m	adipös	4/24 <i>paediGAV</i>	
			schlank	5/30	
	immobil	kleiner als 1,60 m	adipös	5/30	
			schlank	5/35	
		größer als 1,60 m	adipös	4/24 <i>paediGAV</i>	
			schlank	5/30	
jünger als 60 Jahre	mobil	kleiner als 1,60 m	adipös	4/24 <i>paediGAV</i>	
			schlank	5/30	
		1,60 m - 1,80 m	adipös	5/30	
			schlank	5/35	
	immobil	größer als 1,80 m	adipös	5/30	
			schlank	5/40	
		kleiner als 1,60 m	adipös	4/24 <i>paediGAV</i>	
			schlank	5/30	
			größer als 1,60 m	adipös	4/24 <i>paediGAV</i>
				schlank	5/30

Aesculap AG & Co. KG
Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen
Germany
Telefon +49 7461 95-0
Fax +49 7461 95-2600
www.aesculap.de

B BRAUN
SHARING EXPERTISE

CHRISTOPH MIETHKE GMBH & CO. KG

Ulanenweg 2
14469 Potsdam
Germany

Phone +49 331 62 083-0
+49 7000 MIETHKE
Fax +49 331 62 083-40
www.miethke.com