


GAV - GRAVITY ASSISTED VALVE



Alter	Aktivitätsgrad	Größe	Statur	empfohlene Druckstufe in cmH ₂ O
älter als 60 Jahre	mobil	kleiner als 1,60 m	adipös	4/24 <i>paediGAV</i>
			schlank	5/30
	immobil	kleiner als 1,60 m	adipös	5/30
			schlank	5/35
		größer als 1,60 m	adipös	4/24 <i>paediGAV</i>
			schlank	5/30
jünger als 60 Jahre	mobil	kleiner als 1,60 m	adipös	4/24 <i>paediGAV</i>
			schlank	5/30
		1,60 m - 1,80 m	adipös	5/30
			schlank	5/35
	größer als 1,80 m	adipös	5/30	
		schlank	5/40	
	immobil	kleiner als 1,60 m	adipös	4/24 <i>paediGAV</i>
			schlank	5/30
		größer als 1,60 m	adipös	4/24 <i>paediGAV</i>
			schlank	5/30