

GAV[®] - GRAVITY ASSISTED VALVE VALVE GRAVITATIONNELLE



Age	Niveau d'activité	Taille	Corpulence	Niveau de pression recommandé en cmH ₂ O
plus de 60 ans	actif	< 1,60 m	forte	4/24 <i>paediGAV</i>
			mince	5/30
		> 1,60 m	forte	5/30
			mince	5/35
	alité	< 1,60 m	forte	4/24 <i>paediGAV</i>
			mince	4/24 <i>paediGAV</i>
		> 1,60 m	forte	4/24 <i>paediGAV</i>
			mince	5/30
jusqu'à 60 ans	actif	< 1,60 m	forte	4/24 <i>paediGAV</i>
			mince	5/30
		1,60 m - 1,80 m	forte	5/30
			mince	5/35
		> 1,80 m	forte	5/30
			mince	5/40
	alité	< 1,60 m	forte	4/24 <i>paediGAV</i>
			mince	5/30
		> 1,60 m	forte	4/24 <i>paediGAV</i>
			mince	5/30

Les recommandations sont basées sur des traitements habituels de patients, mais peuvent nécessiter des adaptations en fonction de chaque patient.

Distributeur en France: BBraun Medical S.A.S.

204 avenue du Maréchal Juin - BP 331 TEL +33 01 41 10 53 00
FR 92107 Boulogne Cedex FAX +33 01 41 10 53 99
www.aesculap.de

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

CHRISTOPH MIETHKE GMBH & CO. KG

Fabricant: Christoph Miethke GmbH & Co. KG

Ulanenweg 2 TEL +49 331 62 083-0
D-14469 Potsdam FAX +49 331 62 083-40
www.miethke.com