



Age	Grade of activity	Height	Body shape	Recommended pressure level in cmH ₂ O
over 60 years old	mobile	less than 1,60 m	adipose	4/24 <i>paediGAV</i>
			slim	5/30 <i>GAV</i>
		over 1,60 m	adipose	5/30 <i>GAV</i>
			slim	5/35 <i>GAV</i>
	immobile	less than 1,60 m	adipose	4/24 <i>paediGAV</i>
			slim	4/24 <i>paediGAV</i>
up to 60 years old	mobile	less than 1,60 m	adipose	4/24 <i>paediGAV</i>
			slim	5/30 <i>GAV</i>
		1,60 m - 1,80 m	adipose	5/30 <i>GAV</i>
			slim	5/35 <i>GAV</i>
		over 1,80 m	adipose	5/30 <i>GAV</i>
			slim	5/40 <i>GAV</i>
	immobile	less than 1,60 m	adipose	4/24 <i>paediGAV</i>
			slim	5/30 <i>GAV</i>
		over 1,60 m	adipose	4/24 <i>paediGAV</i>
			slim	5/30 <i>GAV</i>
			adipose	4/24 <i>paediGAV</i>
			slim	5/30 <i>GAV</i>

These recommendations are based on common patient treatments, but can vary depending on the individual patient's condition.

CHRISTOPH MIETHKE GMBH & CO. KG

Christoph Miethke GmbH & Co. KG | Ulanenweg 2 | 14469 Potsdam | Germany
 Phone +49 (0) 331 62083-0 | Fax: +49 (0) 331 62083-40 | www.miethke.com

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Germany
 Phone +49 (0) 74 61 95-0 | Fax: +49 (0) 74 61 95-26 00 | www.aesculap.com



Alter	Aktivitätsgrad	Größe	Statur	Empfohlene Druckstufe in cmH ₂ O
älter als 60 Jahre	mobil	kleiner als 1,60 m	adipös	4/24 <i>paediGAV</i>
			schlank	5/30 GAV
		größer als 1,60 m	adipös	5/30 GAV
			schlank	5/35 GAV
	immobil	kleiner als 1,60 m	adipös	4/24 <i>paediGAV</i>
			schlank	4/24 <i>paediGAV</i>
größer als 1,60 m		adipös	4/24 <i>paediGAV</i>	
		schlank	5/30 GAV	
jünger als 60 Jahre	mobil	kleiner als 1,60 m	adipös	4/24 <i>paediGAV</i>
			schlank	5/30 GAV
		1,60 m - 1,80 m	adipös	5/30 GAV
			schlank	5/35 GAV
		größer als 1,80 m	adipös	5/30 GAV
			schlank	5/40 GAV
	immobil	kleiner als 1,60 m	adipös	4/24 <i>paediGAV</i>
			schlank	5/30 GAV
		größer als 1,60 m	adipös	4/24 <i>paediGAV</i>
			schlank	5/30 GAV

Diese Empfehlungen sind keine verbindlichen Richtwerte, da je nach Patient und Krankengeschichte auch andere Werte sinnvoll sein können.

CHRISTOPH MIETHKE GMBH & CO. KG

Christoph Miethke GmbH & Co. KG | Ulanenweg 2 | 14469 Potsdam | Deutschland
 Phone +49 (0) 331 62083-0 | Fax: +49 (0) 331 62083-40 | www.miethke.com

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland
 Phone +49 (0) 74 61 95-0 | Fax: +49 (0) 74 61 95-26 00 | www.aesculap.de